



SOFTWARE IMAGING STUDIO: LAUDOS PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA



Tutorial de Download e Instalação do Software ImplantViewer.

Geração de viewers para planejamento cirúrgico
endodôntico a partir de imagens de tomografia (Dicom).

desenvolvemos softwares para
radiologia odontológica:
cefalometria, gestão, laudos
(panorâmica/tomografia),
disponibilização de exames na

isso oferecemos todos os nossos
produtos por um período
gratuito, incluindo suporte no
período.

dos softwares contratados.
Nós atuamos para que suas
ferramentas funcionem bem.
E você apenas se preocupa com
seu negócio.

PÓS-VENDA É NOSSA PRIORIDADE


Nossa prioridade é oferecer um
software de qualidade e um pós-
venda que garanta agilidade na
solução dos problemas.
Isso se reflete nos altos índices
de satisfação dos nossos clientes.



INTRODUÇÃO

Fizemos esse tutorial para poder explicar de forma simples como instalar esse software para analisar os exames dos seus pacientes de forma mais detalhada.

Nas próximas páginas clique nos botões indicados pelas setas

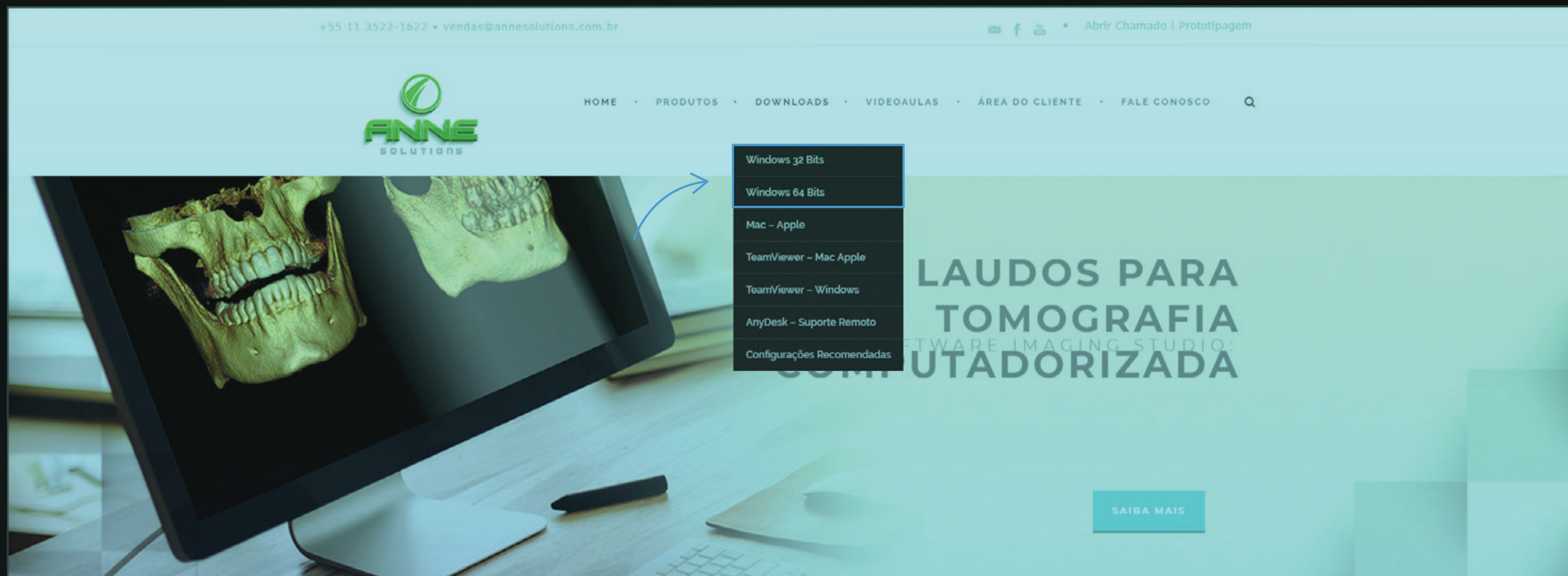

PASSO 1

Escolha sua versão de download. Se não souber qual é a sua versão clique com o botão direito em **Meu Computador** e depois vá em **Propriedades** e depois veja em **Tipo do Sistema** qual é o seu.



GRATUITO

que somente na
ário consegue ver
de um software. Por
os todos os nossos
por um período
luindo suporte no
período.



TRANQUILIDADE PARA O SEU NEGÓCIO

Nossos planos comerciais
incluem suporte e atualização
dos softwares contratados.
Nós atuamos para que suas
ferramentas funcionem bem.
E você apenas se preocupa com





PÓS-VENDA É NOSSA PRIORIDADE

Nossa prioridade é oferecer um
software de qualidade e um pós-
venda que garanta agilidade na
solução dos problemas.
Isso se reflete nos altos índices
de satisfação dos nossos clientes.

PASSO 2

Vá até a ultima versão do Implantviewer e clique em **download**.

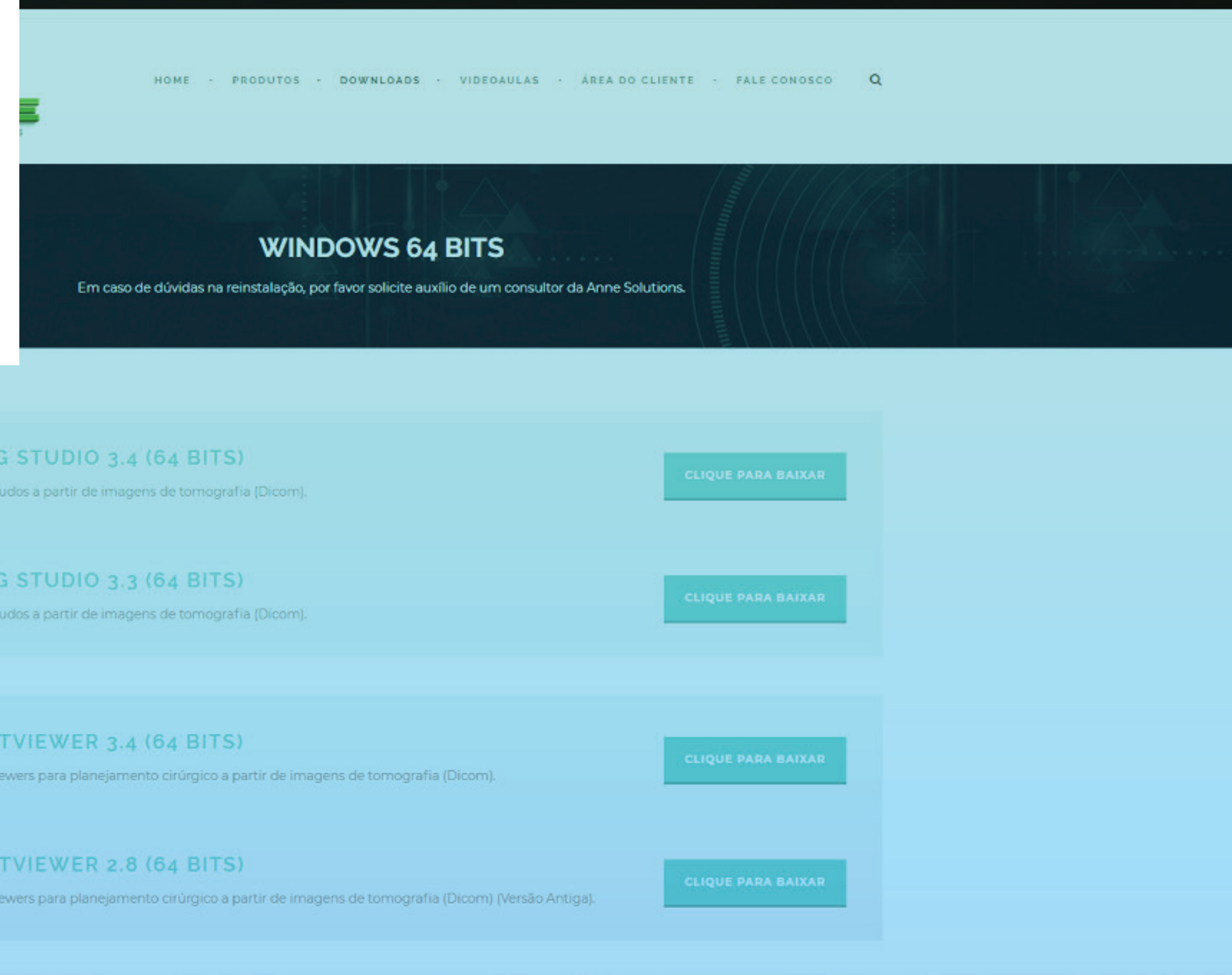

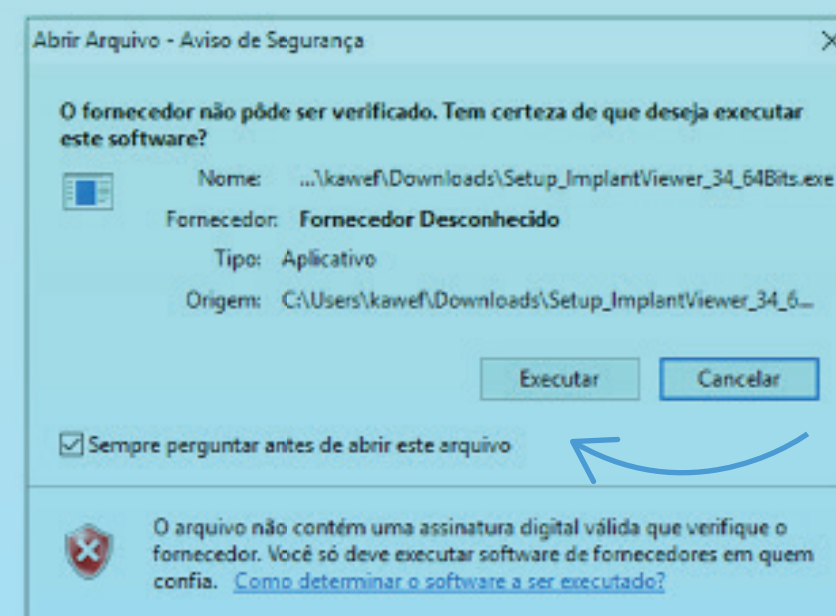

PASSO 3


Após o download finalizar comece a instalação, vá avançando até que a instalação seja concluída. Nas telas a seguir terá marcado onde clicar.


Selecione o Idioma do Instalador


Selecione o idioma pra usar durante a instalação:


Português Brasileiro


OK Cancelar

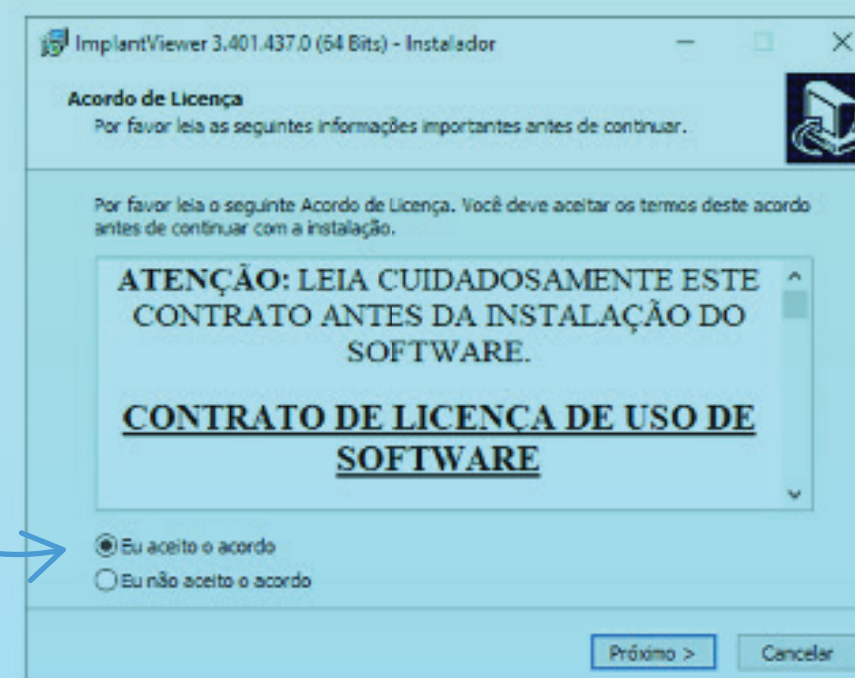


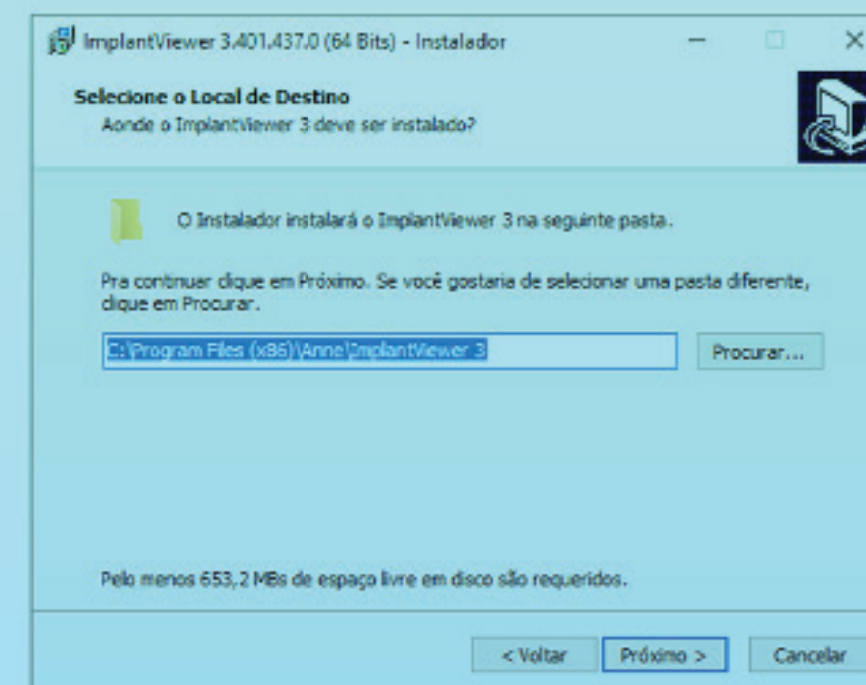

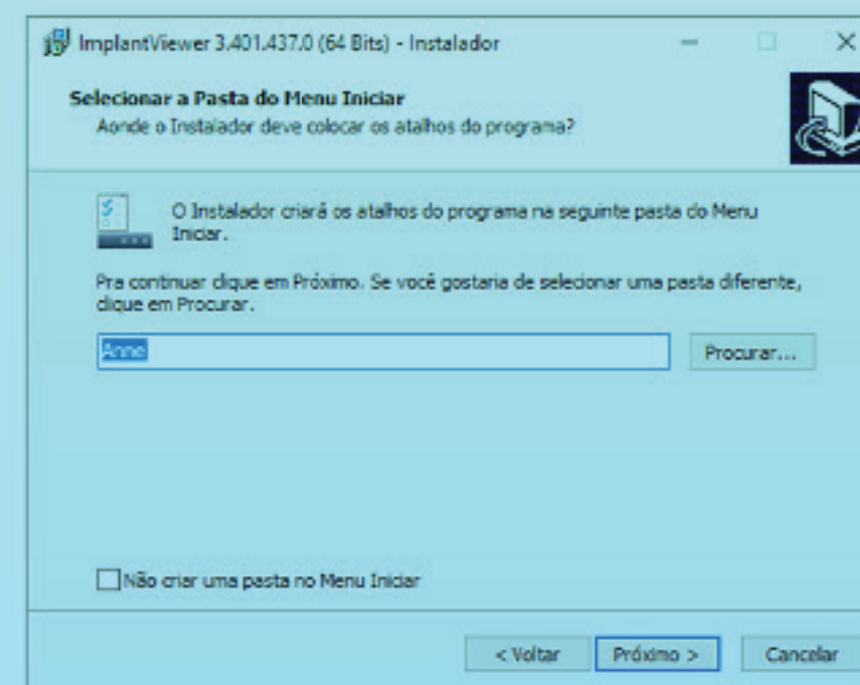

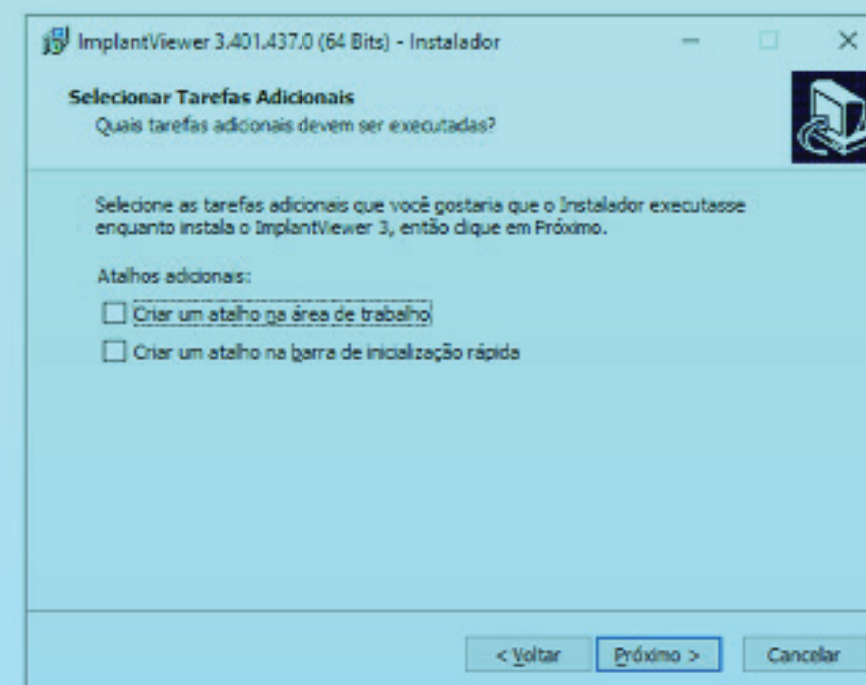


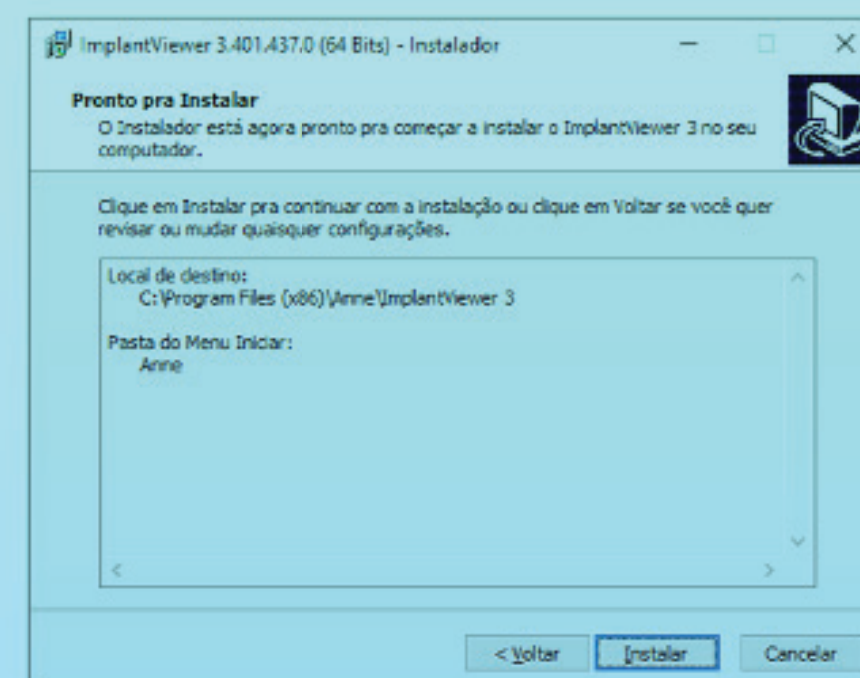

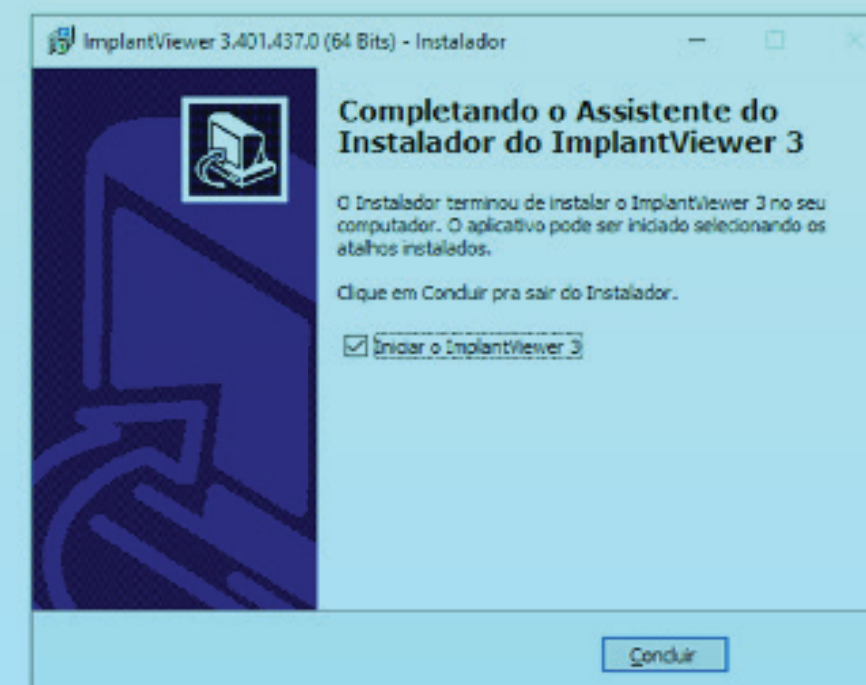

FINAL

Agora que a instalação foi concluída é só usar o software e aproveitar ao maximo suas funcionalidades para poder auxiliar no planejamento do seu trabalho.

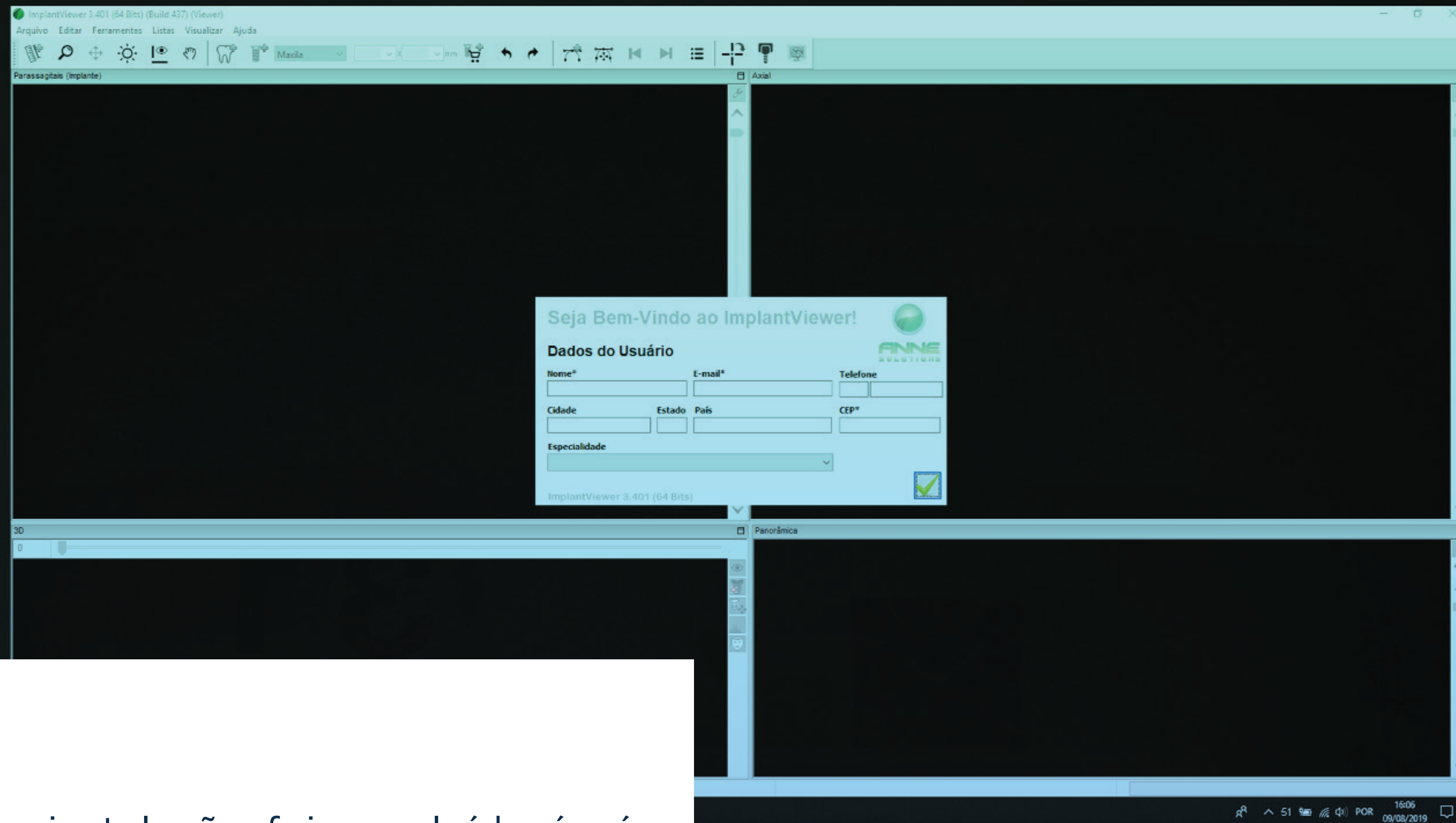

**FK**

Radiologia
Odontológica

Nova Venécia
(27)3752-3392

São Mateus
(27)3767-2579